# ClearReader Guia do Usuário



# O que está na caixa?

- Dispositivo de digitalização e leitura ClearReader
- Cabo de alimentação
- Adaptador de energia (110 a 220 V)
- Adaptador USB

# Como configurar o Clear Reader para primeiro uso:

### Conexão do cabo de energia:

- Conecte a extremidade de cilindro duplo do cabo de alimentação ao adaptador de energia.
- Conecte a extremidade circular pequena do cabo do adaptador à parte traseira do ClearReader (soquete no lado esquerdo).
- o Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de parede.
- Deixe o ClearReader carregando por algumas horas.

#### Preparação do braço da câmera:

- Incline a tela de 10 polegadas do ClearReader para baixo até o final.
- Empurre suavemente o braço da câmera na parte frontal até ouvir um clique. O braço se abrirá automaticamente.
- Volte a tela até a posição inicial

#### • Ligar e desligar:

- O botão Liga/Desliga é o pequeno botão laranja circular no lado superior direito.
- Pressione uma vez para ligar. Você ouvirá "Bem-vindo ao ClearReader" quando estiver pronto.

 Pressione Liga/Desliga novamente para modo de suspensão ou segure por 2 segundos para desligar.

### • Digitalização do documento:

- Coloque o material de leitura com o lado impresso para cima na área de digitalização sob a câmera.
- Pressione o botão redondo no canto superior direito "SCAN". O ClearReader tirará uma foto e começará a leitura.

#### • Ajuste do volume e da velocidade:

- Volume: Gire o botão VOLUME no canto superior direito para ajustar, gire para cima para aumentar ou para baixo para diminuir.
- Velocidade: Gire a ROLETA DE VELOCIDADE no canto superior esquerdo para ajustar a velocidade de leitura, gire para cima para aumentar ou para baixo para diminuir.

#### • Teclas de movimento:

- Use as setas no canto superior esquerdo, para mover-se palavra por palavra no documento digitalizado, use a seta esquerda para retroceder e direita para avançar.
- Segure as setas por 2 segundos para mover-se por frase.

#### • Percorrer documentos:

 Você pode alternar entre documentos abertos usando combinações de teclas atribuídas. Consulte o manual avançado para mais detalhes sobre atribuições de teclas.

Este guia rápido cobre a configuração inicial, operação básica e ajustes principais do ClearReader. Para uma experiência completa e informações detalhadas, consulte o manual avançado do usuário.

# Garantia do produto

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

# Guia do usuário e documentos

Para baixar o manual completo do produto e documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link: <a href="www.tecassistiva.com.br/suporte/">www.tecassistiva.com.br/suporte/</a> ou pelo QR CODE:



# Suporte ou dúvidas:

Site: www.tecassistiva.com.br

Email: suporte@tecassistiva.com.br

Telefone: (11)3266-4311 opção 2

Endereço: Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis, São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato com a Tecassistiva.

