Ruby 7 Guia do Usuário



O que vem na caixa:

- Lupa eletrônica Ruby 7
- Adaptador A/C
- Conector de energia padrão BR
- Bolsa para transporte
- Flanela de limpeza
- Cabo USB
- Cabo HDMI
- Carta de Boas-vindas
- Guia de Usuário
- Termo de Garantia
- Checklist

A seguir, o guia de início rápido irá ajudar a se familiarizar com o primeiro uso. Para informações complementares, acesse o manual completo do produto.

Abaixo estão os passos para configurar e usar rapidamente o RUBY 7 pela primeira vez.

- 1. Certifique-se de que a unidade esteja totalmente carregada.
- 2. Ligue a unidade pressionando o botão Ligar verde/amarelo ou abrindo o suporte de leitura.
- 3. Siga um destes procedimentos:

- Segure a unidade como um tablet para visualizar os itens próximos e distantes. Isso é útil quando você deseja ampliar e ler objetos como rótulos ou detalhes em latas, embalagens, frascos de comprimidos e muito mais. Você também pode usar esta posição para autovisualização.
- Abra o suporte de leitura para colocar a unidade em um documento plano, como um jornal ou revista, uma conta ou recibo, uma carta e assim por diante.

Descrições dos botões:

- -Ligar(verde/amarelo): Pressione para ligar a unidade. Pressione-o novamente para desligar.
- Ampliação (amarelo): Pressione e segure para ampliação contínua do zoom com imagens ao vivo. Ao visualizar imagens estáticas, pressione e solte para aumentar ou diminuir gradualmente a ampliação.
- Modo de cor (azul): Pressione para percorrer cinco modos de cor padrão e 16 modos de cor adicionais.

- Congelar quadro (vermelho): Pressione para congelar a imagem atual. Pressione-o novamente para desativar o modo Congelar quadro e retornar à exibição ao vivo.
- Panorâmico (preto): Role verticalmente ou horizontalmente em uma imagem ampliada congelada ou capturada.

Garantia do produto

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

Guia do usuário e documentos

Para baixar o manual completo do produto e documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link:

<u>www.tecassistiva.com.br/suporte/</u> ou pelo QR CODE:



Suporte ou dúvidas:

Site: www.tecassistiva.com.br

Email: suporte@tecassistiva.com.br

Telefone: (11)3266-4311

opção 2

Endereço: Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis,

São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato

com a Tecassistiva.

Obrigado por comprar o seu Ruby 7 com a Tecassistiva!