

# Ruby XL HD

## Guia do Usuário



**TECASSISTIVA**  
Tecnologia & Acessibilidade

O que vem na caixa:

- Lupa eletrônica Ruby XL HD
- Adaptador A/C
- Conector de energia padrão BR
- Bolsa para transporte
- Flanela de limpeza
- Cabo USB
- Carta de Boas-vindas
- Guia de Usuário
- Termo de Garantia
- Checklist

A seguir, o guia de início rápido irá ajudar a se familiarizar com o primeiro uso. Para informações complementares, acesse o manual completo do produto.

Antes de usar RUBY XL HD pela primeira vez, você deve carregar sua bateria. Uma carga completa leva aproximadamente três horas.

### **Ligando o RUBY**

Pressione o botão verde/amarelo para ligar o RUBY. Após alguns segundos, o ícone de status da bateria é exibido na tela.

### **Descrições dos botões:**

**Ligar (verde/amarelo):** Pressione para ligar. Pressione-o novamente para desligar.

**Seleção de cor (azul):** Pressione para alternar entre Normal (cor), Preto no branco, Branco no preto, Amarelo no azul e Amarelo no preto.

**Ampliação (amarelo):** Pressione para percorrer três níveis diferentes de ampliação. A ampliação varia dependendo de quão longe você segura RUBY de um objeto.

**Congelar Quadro (Vermelho):** Pressione para congelar a imagem atual. Pressione-o novamente para desligar o modo Congelar quadro.

**Para uso, siga um destes procedimentos:**

Gire e estenda a alça para segurar e usar a unidade como uma lupa. Isso é útil quando é necessário ampliar e ler objetos como rótulos ou detalhes em latas, embalagens, frascos de comprimidos e muito mais.

Abra o suporte de leitura para colocar a unidade em um documento plano, como um jornal ou revista, uma conta ou recibo, uma carta e assim por diante.

### **Garantia do produto:**

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

### **Guia do usuário e documentos:**

Para baixar o manual completo do produto e documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link: [www.tecassistiva.com.br/suporte/](http://www.tecassistiva.com.br/suporte/) ou pelo QR CODE:



**Suporte ou dúvidas:**

**Site:** [www.tecassistiva.com.br](http://www.tecassistiva.com.br)

**Email:** [suporte@tecassistiva.com.br](mailto:suporte@tecassistiva.com.br)

**Telefone:** (11)3266-4311

opção 2

**Endereço:** Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis,  
São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato  
com a Tecassistiva.

Obrigado por comprar sua Ruby XL HD com a  
Tecassistiva!