Guia do Usuário Traveller HD



O quem vem na caixa:

- Traveller HD.
- Um estojo de proteção.
- Uma fonte de alimentação.
- Um pano de limpeza de tela.
- Carta de Boas-vindas
- Guia de Usuário
- Termo de Garantia
- Checklist

A seguir, o guia de início rápido irá ajudar a se familiarizar com o primeiro uso. Para informações complementares, acesse o manual completo do produto.

Começando

O Traveller HD está posicionado corretamente à sua frente quando a tela está voltada para cima e

a roda de Zoom está localizada no lado direito da tela.

Usando o Traveller HD

- O Traveller HD só pode ser usado na posição aberta. A tela será colocada em um ângulo ergonômico para uma posição de leitura ideal, enquanto a câmera apontará para baixo. A posição aberta permite ler textos longos e deslizar facilmente sobre documentos. Para abrir a unidade, siga estes passos:
- 1. Coloque o Traveller HD à sua frente de forma que a tela fique voltada para cima e a roda de Zoom fique no lado direito da tela.
- 2. Pressione os dois botões azuis de liberação localizados nas laterais externas do rolo. A tela Traveller HD será desbloqueada, subirá e ligará.
- 3. Levante a tela até que ela trave na posição para cima.

Botões

Ligar/Desligar

Para ligar o Traveller HD, pressione o botão laranja Ligar / Desligar localizado acima da roda Zoom no lado direito da unidade por 2 segundos.

Ajustando a ampliação

Para ajustar a ampliação, use a roda Zoom no lado direito do Traveller HD. Role para cima para aumentar o zoom e role para baixo para diminuir o zoom.

Escolhendo os modos de visualização

Pressionar o grande botão azul Modo entre o botão Menu e Linha de leitura à esquerda da tela permite que você selecione um dos 5 modos de visualização.

Foto: Para tirar uma foto, pressione o botão branco Foto localizado abaixo da roda de Zoom. Ele permite que você tire uma foto temporária de um texto ou imagem.

Menu: Pressione o botão azul Menu localizado no lado esquerdo da unidade, marcado com a palavra "Menu" para ativar o menu de configurações do Traveller HD.

Linha de leitura: O Traveller HD pode exibir uma linha de leitura para ajudá-lo a posicionar o Traveller diretamente no documento. Para exibir a linha de leitura, pressione o botão azul Linha de leitura abaixo do botão Modo.

Garantia do produto

"Nossa garantia cobre defeitos de fabricação em materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. Defeitos resultantes de manutenção inadequada, reparos não autorizados ou falha em seguir as instruções operacionais são apenas alguns dos itens não cobertos. Danos causados pelo uso de acessórios e peças, incluindo carregadores, que não foram autorizados anulam a garantia.

Para receber serviços, entre em contato com a Tecassistiva".

Guia do usuário e documentos

Para baixar o manual completo do produto e documentos acesse o site da Tecassistiva na aba suporte no link: www.tecassistiva.com.br/suporte/ ou pelo QR CODE:



Suporte ou dúvidas:

Site: www.tecassistiva.com.br

Email: suporte@tecassistiva.com.br

Telefone: (11)3266-4311 opção 2

Endereço: Rua das Camélias, 37 - Mirandópolis,

São Paulo - SP, 04048-060

Para obter suporte técnico, entre em contato com

a Tecassistiva.

Obrigado por comprar seu produto com a Tecassistiva!